



# Acc. free nitrilhandsker

Varenummer 100006803, 100006804, 100006805, 100006806 & 100006807

*Excellent*  
**Accelerator fri nitrilhandsker, pudderfri, blå**



## **Beskrivelse**

---

Undersøgelsehandske i nitril (Nitrile Butadiene Rubber)

Pudderfri

Usteril

Blå

Mikrotekstureret fingerspidser

Med rullekant

Egnet til håndtering af fødevarer

Produceret for Abena A/S DK, i Malaysia under ISO 9001 og ISO 13485

## **CE**

---

Dual CE-mærket i henhold til Medicinsk Udstyr EU 2017/745 - klasse I og

PPE Regulative EU2016/425, Type B certifikat. Kategori III

AQL<sub>≤</sub> 1,5 i henhold til EN 455-1

## **Standarder**

---

EN 455-1, 2, 3 & 4

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018

EN 374-2:2015

EN 374-3:2003

EN 16523-1:2015 + A1:2018

EN ISO 374-4:2019

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN ISO 21420:2020

ASTM D6978-05

ASTM D6319

ASTM F1671



# Acc. free nitrilhandsker

Varenummer 1000006803, 1000006804, 1000006805, 1000006806 & 1000006807

## Fysiske egenskaber

Brudstyrke:  
Før belastning 6 Newton  
Efter belastning ved 70°C i 166 timer 6 Newton  
Gennem hele holdbarhedsperioden 6 Newton

Strækkevne:  
Før belastning min. 500%  
Efter belastning ved 70°C i 166 timer min. 400%

## Forpakning

200 stk. pr. æske  
10x200 stk. pr. karton  
54 kartoner pr. palle

## Tykkelse

Håndfladen 0,05 mm (+/- 0,02)  
Fingrene 0,07 mm (+/- 0,03)  
Håndled >0,05 mm

Størrelser	Varenr.	Int. Str.	Håndfladen mm (+/- 4)	Længde mm (+/- 5)
Xsmall	1000006803	5-6	76	240
Small	1000006804	6-7	86	240
Medium	1000006805	7-8	98	240
Large	1000006806	8-9	107	240
Xlarge	1000006807	9-10	115	240

## Test udført

Sensibiliseringstest  
Irritationstest  
Cytotoksitet  
Restkemikalier  
Brudstyrke  
Pudderrester  
Virusgennemtrængning  
Fødevaregodkendelse  
Kemikalie- og cytostatika gennemtrængning (se liste med resultater)



# Acc. free nitrilhandsker

Varenummer 100006803, 100006804, 100006805, 100006806 & 100006807

## Sammensætning

Kemikalie	CAS	Rest kemikalier
Nitrile NBR	9010-81-5	Nitrile NBR
Zinc Oxide	1314-13-2	Zinc Oxide
Potassium Hydroxide	1310-58-3	Potassium Hydroxide
Titanium Dioxide	13463-67-7	Titanium Dioxide
Blue Pigment		Blue Pigment

Kemikalierne og mængderne anvendt er i overensstemmelse med US 21 CFR 177

## Kemikalie gennemtrængning

Kemikalie	CAS	Gennemtrængningstid	Klasse
Ammoniak 25%	1336-21-6	4 min	0
Eddikesyre 99%	64-19-7	3 min	0
Ethanol 70 %	64-17-5	25 min	1
Ethidium bromide 5%	<b>1239-45-8</b>	<b>&gt;480 min</b>	<b>6</b>
Formaldehyd 37%	50-00-0	>60 min	3
Glutaraldehyde 50%	111-30-8	>480 min	6
Hydrogen peroxid 30%	7722-84-1	<5 min	0
Isopropanol 45 %	67-63-0	>480 min	6
Isopropanol 70%	67-63-0	<3 min	0
Methanol i vand 1,5%	67-56-1	>480 min	6
Natrium hydroxid 40%	1310-73-2	>480 min	6
Natrium saltsyre 10-13%	7681-52-9	>480 min	6
N-heptan	142-82-5	3 min	0
Phenol 0,1%	108-95-2	>480 min	6
Svovlsyre 50%	7664-93-9	>480 min	6
Saltpetersyre 65%	7697-37-2	5 min	0
Methanol i vand 1,5%	67-56-1	>480 min	6



# Acc. free nitrilhandsker

Varenummer 100006803, 100006804, 100006805, 100006806 & 100006807

<b>Cytostatika</b>			<b>Test metode</b>
Carmustine 3.300 ppm	26 min	1	ASTMD6978-05
Cisplatin 1.000 ppm	>240 min.	5	ASTMD6978-05
Cefuroxim 90.000 ppm	>480 min.	6	
Cyclophosphamide 20.000 ppm	>240 min.	5	ASTMD6978-05
Dacarbazine 10.000 ppm	>240 min.	5	ASTMD6978-05
Dicloxacilin 10.000 ppm	>480 min.	6	
Doxorubicin Hydrochloride 2.000 ppm	>240 min.	5	ASTMD6978-05
Etoposide 20.000 ppm	>240 min.	5	ASTMD6978-05
Fluorouracil 50.000 ppm	>240 min.	5	ASTMD6978-05
Gentamicin 40.000 ppm.	>480 min.	6	
Methotrexate 25.000 ppm	>240 min.	5	ASTMD6978-05
Mitomycin C 500 ppm	>240 min.	5	ASTMD6978-05
Mitoxantrone 2.000 ppm	>240 min.	5	ASTMD6978-05
Paclitaxel (Taxol) 6.000 ppm	>240 min.	5	ASTMD6978-05
ThioTepa 10.000 ppm	59 min	2	ASTMD6978-05
Vincristine Sulfate 1.000 ppm	>240 min.	5	ASTMD6978-05

## Opbevaring og håndtering:

*Opbevaring:* 10-30°C

Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon

*Holdbarhed* 3 år fra produktionsdato

*Holdbarhed åbnet:* 3 år fra produktionsdato, med forbehold for korrekt opbevaring

*Bortskaffelse af varen:* Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Hvis mistanke om kontaminering, skal de bortskaffes som klinisk affald.

*Underemballage:* Karton

*Bortskaffelse:* Brændes/Genbruges

*Yderemballage:* Karton

*Bortskaffelse:* Brændes/Genbruges



# Acc. free nitrilhandsker

Varenummer 100006803, 100006804, 100006805, 100006806 & 100006807

## Abena handskeguide

Dit behov:	Nitrilhandsker	Latexhandsker	Vinylhandsker
Plejeopgaver	✓	✓	%
Medicindosering	✓	%	%
Blod/Kropsvæske	✓	✓	%
Kemoterapi <sup>*1</sup>	✓	%	%
Hormoncreme	✓	%	%
Cremer og sæber <sup>*2</sup>	✓	%	%
Rengøring <sup>*3</sup>	✓	✓	✓
Fødevarer <sup>*4</sup>	✓	✓	✓

<sup>\*1</sup> Specifikke cytostatika test er anført på databladet. <sup>\*2</sup> Olieholdige cremer og sæber.

<sup>\*3</sup> Korte rengøringsopgaver uden stærk kemi. <sup>\*4</sup> Vinylhandsker er ikke egnet til håndtering af fede fødevarer.

SK114DK/12.2014