

DekoRen+ Enzym

Produkttype/ Bruksområde:

Enzymbasert, nøytralt og flytende rengjøringsmiddel for skånsom rengjøring av sensitivt medisinsk utstyr og instrumenter. Kun til profesjonelt bruk.

Maskinoppvaskmiddel for instrumentvaskere, ultralydbad og manuell vask.

Bruksanvisning:

Produktet doseres vanligvis gjennom maskinens doseringsanlegg. Anbefalt dosering er 2-6 g/liter avhengig av dekontaminatortype. Doseres ved 25 °C. Anbefalt vasketemperatur er 45 °C. Enzymens effekt avtar over 55 °C. Vasketemperatur skal ikke overstige dette.

Produktet kan benyttes til manuell vask, i ultralydbad og til bløtlegging. Dosering: 3 - 5 m/L avhengig av tilsmussingsgrad (ca. 0,5 dl per 10 l vann). Anbefalt temperatur: 45 °C i ca. 10 minutter. Ved manuell rengjøring anbefales Lilleborg doseringspumpe.

Egenskaper:

pH: 7,5 (ufortynnet)

Spes. vekt: ca. 1,13 kg/l.

Rustfritt stål, kobber, messing og aluminium påvirkes ikke.

Lagringsbetingelser / Holdbarhet:

Lagres i originalemballasjen ved frostfri lagring. Bør ikke lagres ved temperaturer over 40 °C. Holdbar 2 år etter produksjonsdato.

Miljøråd:

- Sørg for korrekt og hensiktsmessig innlastning av utstyr for effektiv rengjøring.
- Unngå over- eller underdosering.
- Følg anbefalt temperatur for hygienisk rengjøring og desinfeksjon.
- Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av produktets emballasje (Grønt punkt symbol)

