


PRODUKTDATABLAD TENA PROSKIN COMFORT

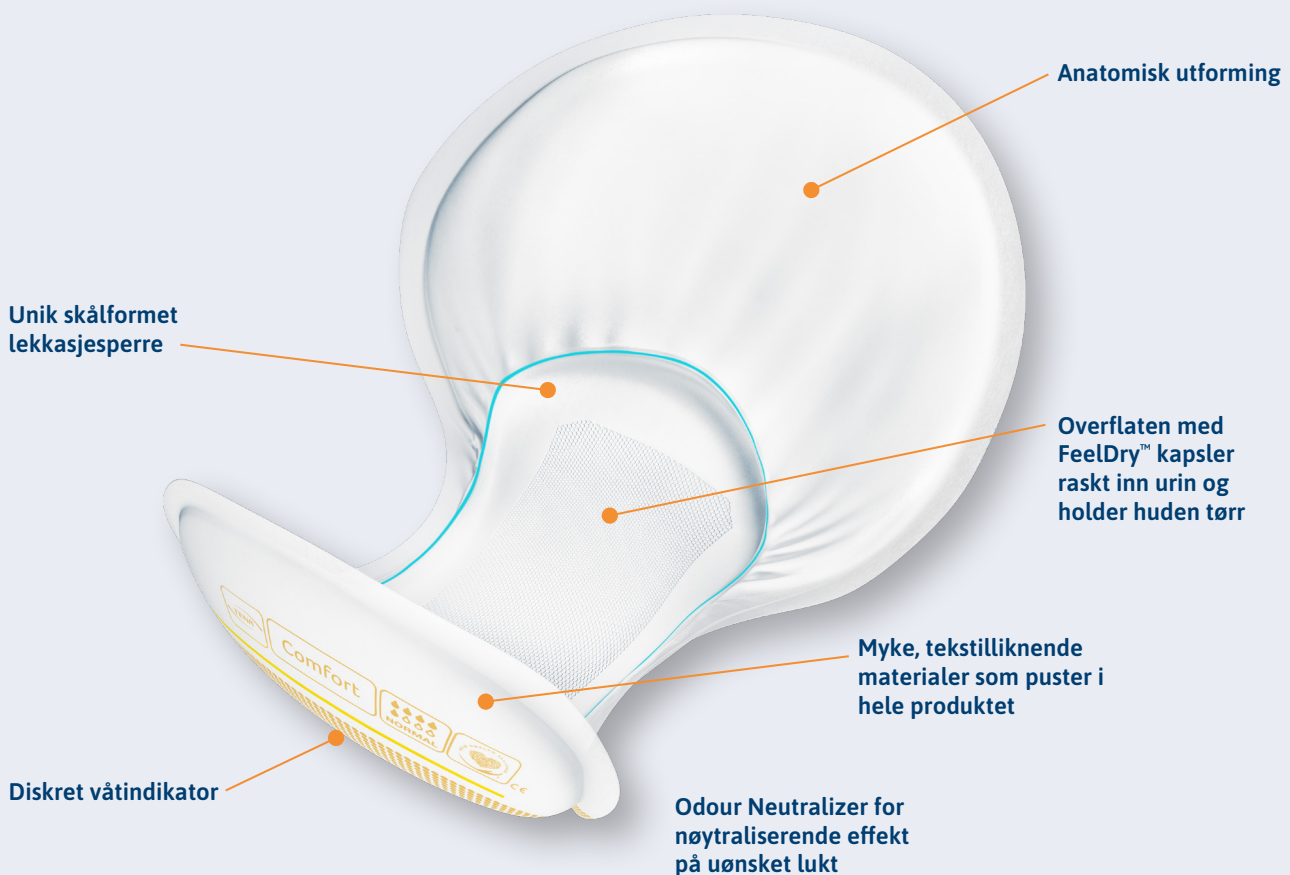

Bruksområde

TENA Comfort er et svært lekkasjesikkert og komfortabelt todelt system for middels til tung inkontinens. TENA Comfort finnes i seks ulike absorpsjonsnivåer (Normal, Plus, Extra, Super, Maxi og Ultima). Riktig størrelse og kvalitet på fikseringstrusene er viktig for at produktet skal sitte godt mot kroppen.



PRODUKTDATABLAD TENA PROSKIN COMFORT



Produktegenskaper

TENA Comfort er både lekkasjesikkert og komfortabelt. Doble absorberende kjerner med superabsorbenter i kombinasjon med FeelDry™-overflaten gjør at urinen spres og absorberes effektivt. Overflaten mot huden holdes tørr, hvilket legger grunnlaget for sunn hud.


Produktet har en anatomisk utforming og en unik patentert skålformet lekkasjesperre som gjør produktet mer lekkasjesikkert.

ConfioAir™ pustende materialer gir økt komfort og bedrer hudens tilstand.

TENA Comfort har Odour Neutralizer, som betyr at produktet har superabsorbenter som kapsler inn urin, og har en nøytraliserende effekt på uønsket lukt. Produktet har våtindikator og tydelig fargemarkering til hjelp ved valg av absorpsjonsnivå.

TENA COMFORT											
Absorpsjonsnivå/ størrelse	Svane- merket	Lengde cm	Bredde cm	Vekt g	Antall/ pose stk	Antall/ kart stk	Antall kart pall	ISO 11948-1 Absorpsjons- kapasitet	NAF nr.	Godkjent Helfo	Essity Art.nr
Normal	✓	52	22	46	42	126	16	1070	932365	✓	75 90 07
Plus	✓	63	27	70	46	92	16	1600	927024	✓	75 90 08
Extra	✓	63	27	78	40	80	16	1900	869314	✓	75 90 09
Super	✓	63	27	88	36	72	16	2200	819393	✓	75 90 10
Maxi	✓	66	29,5	111	28	56	16	2900	862157	✓	75 90 12
Ultima	✓	66	29,5	117	26	52	16	3400			75 90 11

BRUKSANVISNING

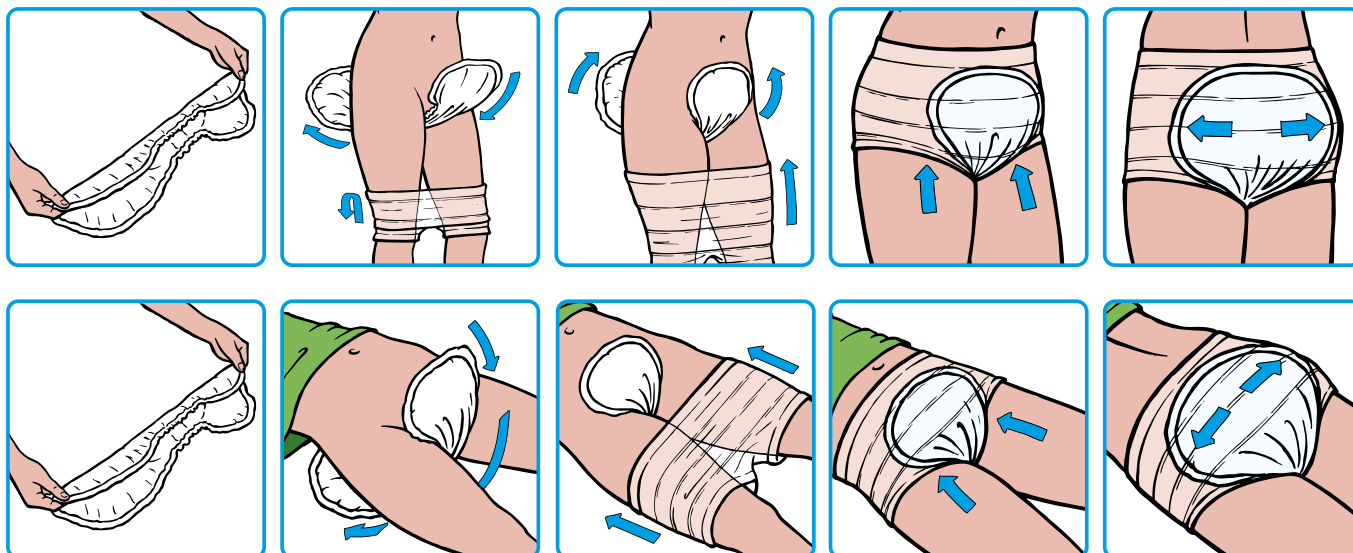

PRODUKTDATABLAD

TENA PROSKIN COMFORT

Varedeklarasjon

OVERFLATE INNSIDEN

Materiale: Nonwoven

Funksjon: Tørrhet/mykhet mot huden

OVERFLATE UTSIDEN

Materiale: Nonwoven

Funksjon: Økt komfort og diskresjon

INNSLIPP- OG SPREDNINGSMATERIALE

Materiale: Polyethylene

Funksjon: Rask absorbering og effektiv spredning av urin, hindrer urinen i å trekke tilbake til overflaten

ABSORBSJONSKJERNE, Øvre

Materiale: Cellulosemasse og superabsorbenter

Funksjon: Spre, absorbere og holde på væsken

ABSORBSJONSKJERNE, Nedre

Materiale: Cellulosemasse og superabsorbenter

Funksjon: Spre, absorbere og holde på væsken

SUPERABSORBENT

Materiale: Polyacrylat

Funksjon: Absorbere og holde på væsken, samt nøytralisere uønsket lukt

SPERRESJIKT

Materiale: Pustende polyeten

Funksjon: Forhindre lekkasje/gjennomvæting, tillate fuktig luft å ventileres ut fra produktet, og således bidra til komfort og et godt miljø for huden

ELASTIKK (TENA Comfort skålformet lekkasjesperre)

Materiale: Polyisopren

Funksjon: Bygge skålfasongen og forhindre lekkasje

TENA Comfort-produkter inneholder ikke:

naturgummi (latex), PVC, kolofonium, duftkomponenter, hudpleiende midler eller parfyme. Produktene kan benyttes inntil tre år etter produksjonsdato. Lagres under normale forhold, og bør ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller fukt. Produktene er klassifisert som medisintekniske, og de er CE-merkede.

Kontakt oss for mer informasjon

☎ 20 70 62 00

🌐 tena.no

 **essity**

TENA,
an Essity brand

