

Overflatedesinfeksjon



Kilto Pro Ytdesinfeksjon 75 er en bruksklar løsning beregnet til desinfisering av synlig rene, harde overflater og er effektiv mot bakterier, sopp og ulike typer virus som f.eks Corona, HIV, Hepatitt B og C samt visse nakne virus som Adenovirus og Murine Norovirus. Den virker raskt og effektivt uten å etterlate spor på den behandlede overflaten.

Produktegenskaper

Dokumentert effekt:

- EN13727 (bakterier) 30 sek
- EN13697 (bakterier) 5 min
- EN13624 (gjærsopp) 30 sek, (sopp) 15 min
- EN13697 (gjærsopp) 60 sek
- EN16615 (bakterier/gjærsopp) – 2 min
- EN14476 (kappeklede virus, Adenovirus, Murine Norovirus) 30 sek
- EN14348 (mykobakterier) 60 sek

Bruksanvisning

1. Rengjør flaten med vanlig rengjøringsmiddel om den er synlig skitten.
2. Sprut rikelig med væske på den rengjorte flaten, alternativt dynk et papirtørk
3. Bearbeid flaten gjentatte ganger i minst 30 sek (se produktblad for kontakttider)
4. La overflaten lufttørke

Innhold

Aktive stoffer

Etanol	623 g/kg ethanol, 63,7 g/kg propan- 2-ol
--------	---

Produksjonsland

SVERIGE

Forpakkingsstørrelse Salgsenhet / Artikkel nr.

Artikkel nr.

GTIN

GTIN (salgsenhet)

12 x 1 l	493-12	7331964004937	7331964904930
----------	--------	---------------	---------------

15 x 500 ml	492-15	7331964004920	7331964904923
-------------	--------	---------------	---------------



Tilleggsinformasjon

Sjekk den oppdaterte versjonen av en trykket brosjyre på vår nettside www.kiilto.no, eller send en epost til vår kundeservice post.no@kiilto.com.