



Antibac®

Overflatedesinfeksjon

75%

Overflatedesinfeksjon



Antibac® Overflatedesinfeksjon 75 % er medisinsk utstyr og det originale og bestselgende desinfeksjonsmiddelet beregnet på synlig rene overflater av ikke-invasivt medisinsk utstyr innen helsetjenesten og tannklinikker. Produktet er også klassifisert som et biocid PT 2 og kan brukes på generelle overflater som tåler alkohol. Effektiv mot bakterier, mykobakterier, ulike virus og gjærsopp. Formelen består av forskjellige alkoholer. Etanol er hovedingrediensen og har farmasøytisk kvalitet.

Produktet leveres i ulike forpakninger og størrelser, se oversikt nedenfor.

Bruksområde

Bruksklar, etanolbasert desinfeksjon for synlig rene overflater på ikke-invasivt medisinteknisk utstyr som tåler alkohol. Produktet er også klassifisert som et biocid PT 2 og kan brukes på generelle overflater som tåler alkohol.

Medisinsk utstyr, for profesjonelt bruk.

Produktegenskaper

Produktet inneholder 75 vol% denaturert etanol av farmasøytisk kvalitet. Væsken fordamper raskt og etterlater ikke rester på overflaten (ingen behov for avskylling etter desinfisering).

Mikrobiologisk informasjon:

EN13727 (effekt bakterier) - 30 sec

EN13697 (effekt bakterier) - 5 min

EN13624 (effekt gjærsopp/muggsopp) - 30 sec/15 min

EN13697 (effekt gjærsopp/muggsopp) - 5 min

EN16615 (effekt bakterier/gjærsopp) - 2 min

EN14476 (effekt kappekleddede virus, Adenovirus, Murine Norovirus) - 30 sec

EN14348 (effekt tuberkulose) - 1 min

Bruksanvisning

Brukes på synlig rene overflater som tåler alkohol. Hvis du er usikker på om overflaten tåler alkohol, kan du prøve et lite synlig område først.

Bruksanvisning:

1. Rengjør overflaten med et vanlig rengjøringsmiddel
2. Fordel rikelig med væske på overflaten eller direkte på en klut.
3. Tørk over flaten gjentatte ganger slik at den er fuktig gjennom hele kontakttiden (se etiketten eller informasjonen om kontakttider over)
4. La overflaten lufttørke (ikke behov for avskylling)

Ikke anbefalt for treverk, stoffmaterialer, naturgummi, malte flater, papirbelagte flater eller silikon.

Innhold	Aktive stoffer	Effekt			
	Etanol	Biocide			
	Isopropylalkohol	Biocide			
	2-Metyl-2-propanol	Denaturering			
Oppbevaring	3 års holdbarhet fra produksjonsdato. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningsskilder.				
Bruker- og miljø sikkerhet	Alvorlige hendelser i forbindelse med Antibac® Overflate 75% bør rapporteres til reklamasjon.no@kiilto.com og til de nasjonale myndigheter for medisinsk utstyr (Statens Legemiddelverk). PT2 biocid for profesjonelt bruk.				
Forpakkingsstørrelse / Artikkel nr.	Salgsenhet	Artikkel nr.	GTIN	GTIN (salgsenhet)	Type forpakning
	12 x 250 ml	600522	7054956005223	7054957005222	Flaske m/sprutinnsats
	15 x 750 ml	600521	7054956005216	7054957005215	Flaske m/sprutinnsats
	12 x 1000 ml	600642	7054956006428	7054957006427	Flaske m/sprutinnsats
Tilleggsinformasjon	Sjekk den oppdaterte versjonen av en trykket brosjyre på vår nettside www.kiilto.no , eller send en epost til vår kundeservice post.no@kiilto.com .				