





Topmatic Clinil ALKALISK MASKINOPPVASK TIL INSTRUMENTER

Topmatic Clinil er et flytende, alkalisk maskinoppvaskmiddel til bruk i instrumentoppvaskmaskiner og bekkenspylere. Topmatic Clinil er spesielt utviklet til vask av bekken, fat, skåler, urinflasker og instrumenter etc. Produktet forhindrer kalkdannelse i maskinen og på oppvaskgodset. Velegnet til bruk i alle vannhardheter.

- **Clean** - Høyeffektiv alkalisk formel som forhindrer kalkdannelse på oppvaskgodset.
- **Safe** - Gjennomsiktig emballasje gjør det enkelt å sjekke produktnivå.
- **Efficient** - Økonomisk i bruk.



BRUKSANVISNING

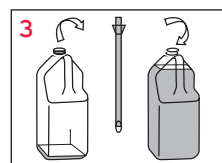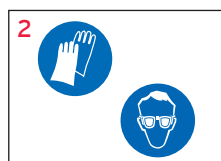

TIL BRUK I ECOLABS DOSERINGSUTSTYR

- 1 Sjekk hygieneplan, og produktetikett for detaljert brukerinformasjon.
- 2 Bruk egnet verneutstyr ved håndtering av produktet.
- 3 Ta forsiktig ut kannerstikken. Skru løs korken på den nye kannen, putt kannerstikken oppi, og plasser kannen i kanneholderen.

Hvis det ikke er installert alarm for tomt produkt, sjekk produktnivå jevnlig og skift kanne ved behov.

SPESIELL INFORMASJON

Kun til profesjonell bruk.

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere.

SIKKERHET

Skal ikke blandes med andre produkter!

For ytterligere informasjon og sikkerhetsinstruksjoner, se produktetikett og sikkerhetsdatablad.

OPPBEVARING

Oppbevares i lukket originalemballasje i temperaturer mellom 0° og 40°C.

FORPAKNING

3x5 l