

VIRKON

BLANDINGSPROSEDYRE

1 tablett pr. 1/2 liter vann
1% bruksløsning



1. Fyll flasken med 500ml lunkent vann.

2. Tilsett 1 stk VirKon tablett.

3. Vend flasken 2-3 ganger 1% bruksløsning er klar.

Bruksløsningen:

Har en rosa farge, en pH på 2,6 og en holdbarhet i 5 dager.

Desinfeksjon av IKKE SYNLIG forurenset utstyr og flater:

Utstyr: La utstyret ligge i VirKon bruksløsning i 10 minutter. Skyll godt med rent vann.

Overflate: Bearbeid flaten grundig med ren klut, fuktet med VirKon bruksløsning. Virketid 10 minutter. Ettetørk med våt klut.

Tekstiler: Bløtlegg tekstilene i VirKon bruksløsning i 10 minutter. Følg deretter tekstilenes vaskeanvisning.

Materialpåvirkning: Ingen negativ materialpåvirkning på: plast, epoxy og rustfritt stål.

Begrensninger på: Mykmetaller og legeringer.

Anbefales ikke til desinfeksjon av: Endoskoper

Drapseffekt på:

- bakterie (ikkemykobakterier (TBC))
- virus
- sopp

Ingen effekt på mykobakterier (TBC) og Clostridium difficile.

Desinfeksjon av SYNLIG forurenset utstyr og flater:

Utstyr: La utstyret ligge i VirKon bruksløsning i 30 minutter. Skyll godt med rent vann.

Overflate: Bearbeid flaten grundig med ren klut, fuktet med VirKon bruksløsning. Virketid 30 minutter. Ettetørk med våt klut.

***Bruk alltid hansker ved håndtering av desinfeksjonsmiddel.
Brukt bruksløsning kan helles direkte i avløp!
Må ikke sprayes da det ikke skal lages aerosoler
av desinfeksjonsmidler!***